

Aan de slag met een PC of Chromebook

Installatie

Om de sessie te beginnen, moet u de app installeren op het apparaat dat voor de training zal worden gebruikt.

- Ga naar **www.acousticpioneer.com** en klik EERST OP DE NEDERLANDSE VLAG, rechtsboven aan de pagina
- Klik daarna op in het blauwe vlak met Download een Trainingsprogramma op de knop 'DOWNLOAD NU!'.
- Installeer de app die u nodig heeft (Stapelgek op Dieren, Vliegles of Elephant Memory Training) voor Chromebook, of voor Windows.
Download het bestand en voer het uit om het op uw computer te installeren.
- Eenmaal geïnstalleerd kunt u starten vanaf de snelkoppeling op het bureaublad of vanaf de plek waar het programma is opgeslagen.

U moet dan de **code invoeren** die door de professional is gegenereerd en vervolgens klikt u op 'Code valideren'. Dat zal de auditieve training beginnen.

BELANGRIJK

Gebruik altijd een externe muis, dit omdat het gebruik van de ingebouwde muis-pad doorgaans tot onnodige frustraties zal leiden.

DE TRAINING MOET WORDEN UITGEVOERD MET EEN STEREOHOOFDTELEFOON DIE DE OREN VOLDOENDE BEDEKT EN COMFORTABEL IS IN HET GEBRUIK. Het hoeven geen dure top-of-the-line modellen te zijn, maar oordopjes zoals iPod in-ear-buds zijn niet ideaal - ze laten te veel lage frequenties uit het oor lekken. Stel het volume van de iPad of tablet in op een gemakkelijk te horen niveau dat nog steeds comfortabel is om naar te luisteren. Houd dit ingestelde volume niveau gedurende de gehele training aan.

Zodra een code is gegenereerd, zal deze inactief blijven tot de eerste keer dat deze wordt gebruikt, waarna het trainingsblok zal beginnen.

Wij raden aan dat de auditieve trainingen 'Stapelgek op Dieren' en Vliegles, 3 keer per week worden gebruikt.

Voor de Elephant Memory Training geldt dat men minimaal 8 weken lang, 4 maal per week traint. Men traint ongeveer 20 minuten per sessie.

De trainingen zullen zichzelf op een geschikt moment uitschakelen.

Men dient aangesloten te zijn op een goed werkende internetverbinding.

Uw behandelaar / coach heeft toegang tot de voortgang van de auditieve training als hij/zij de voortgang wil bekijken.

Als er aanzienlijke frustraties optreden bij de training, raden wij u aan contact op te nemen met de behandelaar / coach voor een follow-up evaluatie of -bespreking voor eventuele verdere aanbevelingen.